



"L'Hygiène et la Qualité dès le prélèvement..."

## Recueil et prélèvement des urines de 24 heures (conteneur 3 litres)

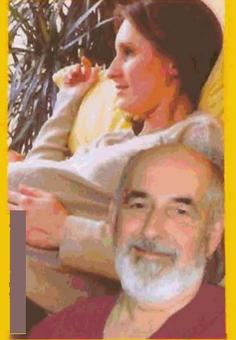

Pour que chacun vive en bonne santé


Recueil de l'urine sur 24 heures dans le conteneur de 3 litres

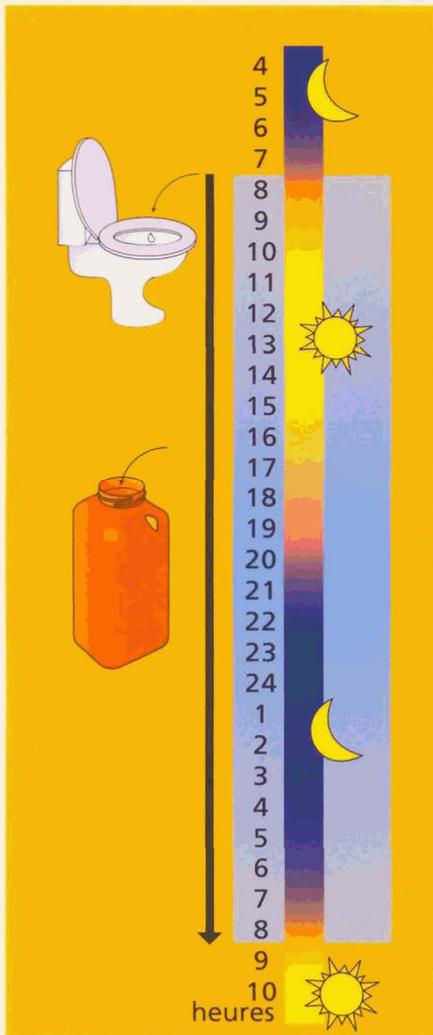


Transfert depuis le conteneur de recueil 3 litres vers le tube BD Vacutainer® bouchon beige



**1** Mentionner sur l'étiquette du tube :  
• les informations patient  
• le volume total recueilli sur 24 h.

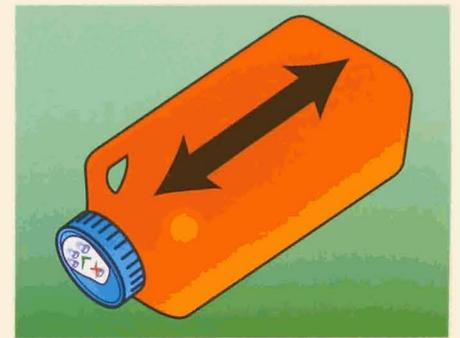

**2** Homogénéiser le conteneur de recueil.

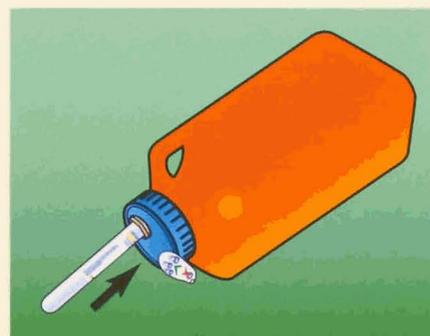

**3** Soulever l'opercule autocollant protecteur. Insérer le tube BD Vacutainer® au niveau de l'orifice et percuter le bouchon. Attendre le remplissage complet du tube. Identifier le tube et le transmettre au laboratoire.



**4** Replacer l'opercule autocollant protecteur sur l'orifice du couvercle.